




Insertion

- 1.** Commencer par ouvrir entièrement l'emballage stérile. Travailler dans des conditions d'asepsie, avec des gants stériles.

OK

Figure 1

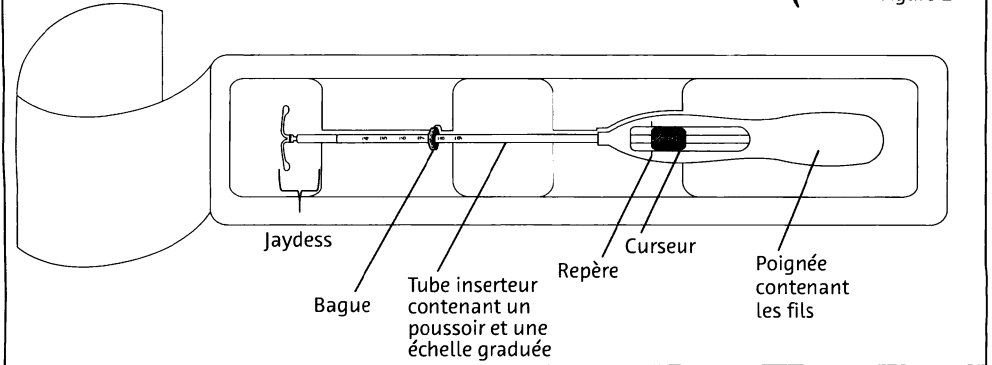


- 2.** Pousser le curseur **vers le haut** (dans le sens de la flèche) jusqu'au bout afin de faire entrer JAYDESS dans le tube inserteur.

OK


Figure 2

IMPORTANT ! Ne pas ramener le curseur vers le bas car cette action pourrait libérer JAYDESS prématurément. Une fois libéré, JAYDESS ne peut plus être replacé dans le tube inserteur.

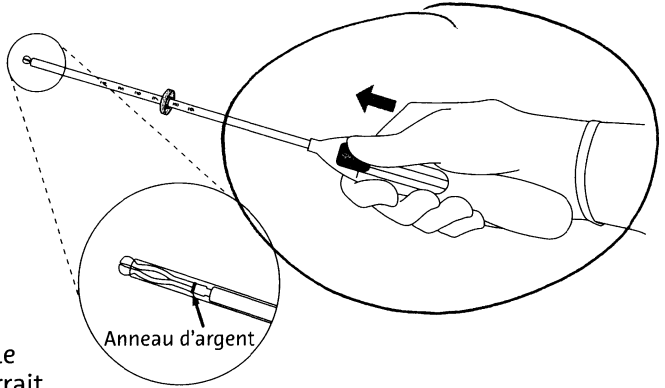


- 3.** Tout en maintenant le curseur avancé en position haute, positionner le bord **supérieur** de la bague au niveau de la valeur correspondant à la profondeur utérine mesurée avec l'hystéromètre.

Figure 3

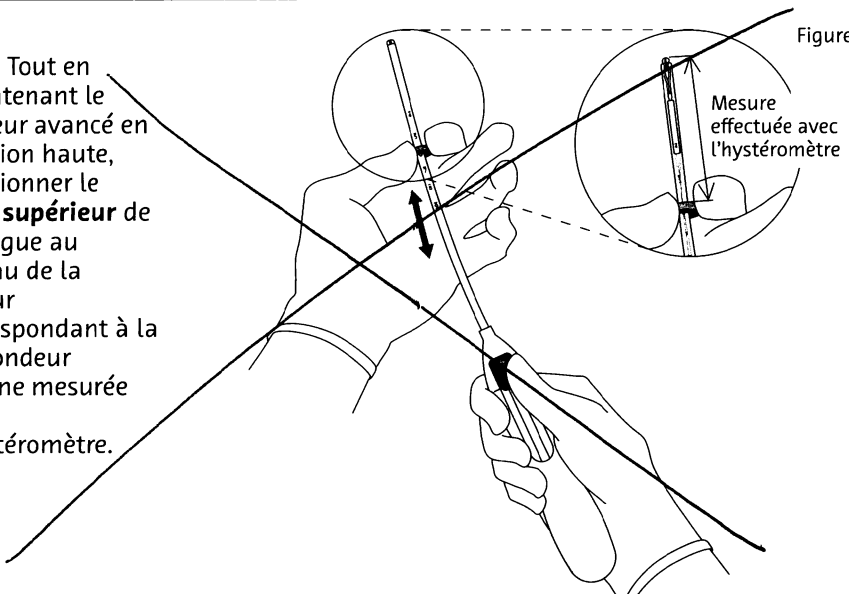


4. Tout en maintenant le curseur **en position haute**, introduire le **tube inséreur** dans le canal cervical jusqu'à ce que la bague soit à une distance d'environ 1,5 à 2,0 cm de l'orifice externe du col utérin.

IMPORTANT ! Ne pas forcer lors de l'introduction du tube inséreur. Si nécessaire, dilater le canal cervical.

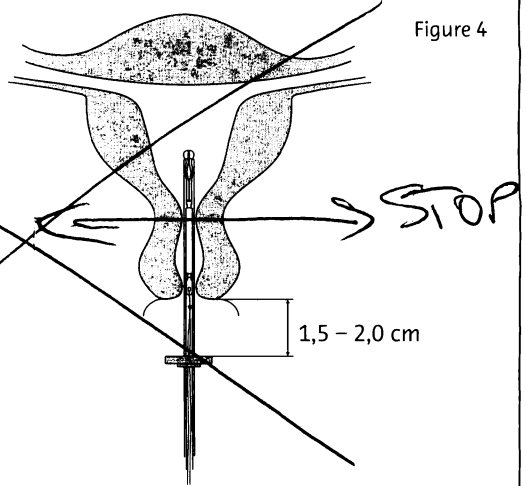


5. Tout en tenant fermement l'inséreur, **ramener le curseur jusqu'au repère** pour déployer les bras latéraux de JAYDESS.

Attendre 5 à 10 secondes que les bras latéraux soient totalement déployés.

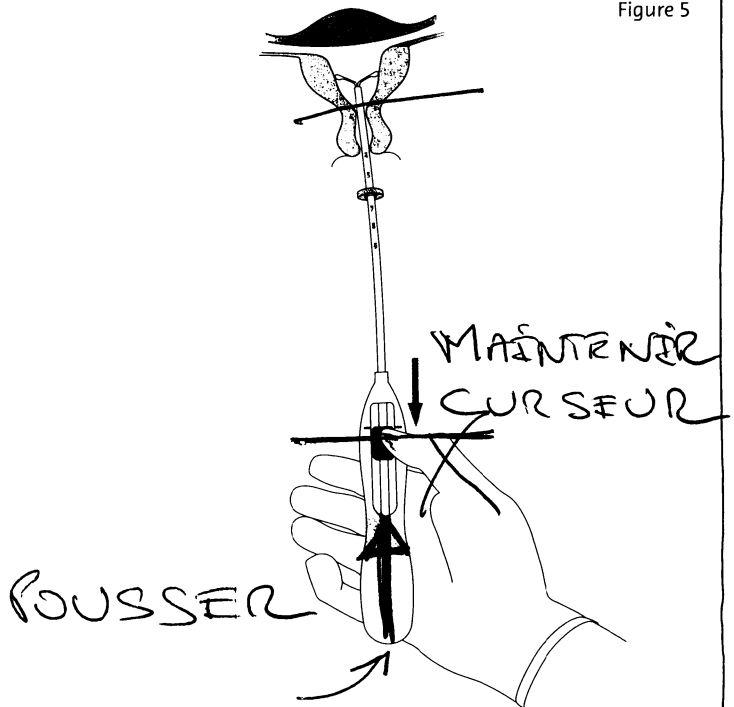

6. Pousser délicatement l'inséreur vers le fond de l'utérus **jusqu'à ce que la bague soit au contact du col utérin**. JAYDESS est à présent positionné sur le fond utérin.

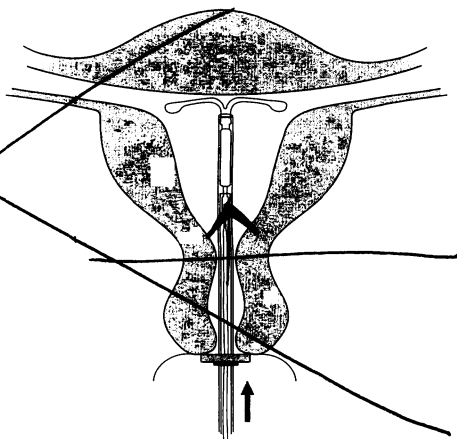

7. Tout en maintenant l'inserteur en place, **ramener complètement le curseur vers le bas** pour libérer JAYDESS.

Retirer le tube inserteur tout en gardant le curseur dans la position basse. **Couper les fils** à environ 2 - 3 cm du col utérin pour les laisser visibles.

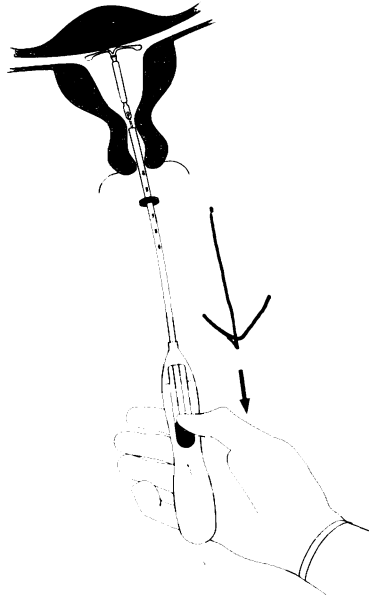


Figure 7

IMPORTANT ! En cas de doute sur le bon positionnement de JAYDESS, vérifier sa position (par exemple, par une échographie). En cas de mauvaise position dans la cavité utérine, JAYDESS doit être retiré. Ne jamais réinsérer un système qui a été retiré.

Retrait/remplacement

Concernant le retrait/remplacement du système, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit de JAYDESS.

Pour retirer JAYDESS, tirer sur les fils avec une pince.

Un nouveau système JAYDESS peut être inséré immédiatement après le retrait de l'ancien.

Après le retrait de JAYDESS, le système doit être inspecté afin de vérifier qu'il est intact.

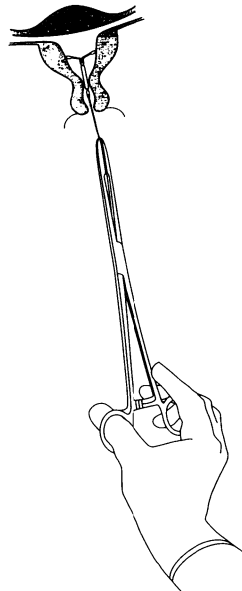


Figure 8